

ANLEITUNG SPEICHELPROBENENTNAHME MITTELS KAUSTRICK

Befestigung des Kastricks

- 1
 - Platzieren Sie das Seil an einer sauberen Stelle an der Buchtentrennwand oder in der Buchtmitte (fixiert an einer Querstange), entfernt von Futter- und Wasserquelle.
 - Ein Kastrick reicht für bis zu 25 Tiere/Bucht; bei größeren Gruppen verwenden Sie zwei Stricke.
 - Positionieren Sie das Seil so, dass das freie Ende auf Schulterhöhe der Tiere endet.
 - Befestigen Sie den Kastrick sehr fest und dröseln dann das Ende auf.



Speichelgewinnung

- 2
 - Beim Bekauen des Seils sammelt sich Speichel im Seil.
 - Belassen Sie das Seil ca. 20 Minuten in der Bucht, dann hat ein Großteil der Schweine darauf gekaut.



Probenentnahme

- 3
 - Tragen Sie Einmalhandschuhe, um eine Kontamination der Probe zu vermeiden.
 - Geben Sie das nasse Ende des Seils in den beigelegten Sack.
 - Durch festes Abstreifen des Seils wird die darin gespeicherte Flüssigkeit ausgepresst und sammelt sich im Plastiksack.
 - Die gewonnene Speichelprobe wird nun in das Probengefäß umgefüllt. Dies gelingt sehr einfach, indem eine Ecke des Sackes abgeschnitten wird.
 - Alle gebrauchten Utensilien werden entsorgt (Strick, Beutel, Handschuhe).



Probenversand

- 4
 - Der Versand der beschrifteten Probe in das Labor sollte gekühlt und möglichst rasch erfolgen, um ein optimales Ergebnis zu bekommen.

